



Jockey & Jockey Plus

Bruksanvisning

Sikkerhet

Krabat Jockey er CE-merket. Dette er din garanti for at produktet oppfyller alle europeiske helse og sikkerhetskrav. Produktet er CE-merket i henhold til **EN 12182:2012** og **EN12183:2009** Denne bruksanvisningen er godkjent i henhold til disse standardene.

Krabat Jockey benytter materialer som tilfredsstillers NS-EN 1021 iht. antennelighet.

Holdbarheten på produktet tilsvarer en levetid på ca 5 år ved normal bruk. Deretter skal produktet renoveres av Krabat AS eller en godkjent partner for å forleng levetiden. All service skal utføres av Krabat eller en godkjent partner. Service manual foreligger ikke.



Advarsler

Ved ombygging av produktet og ved bruk av uoriginale deler skal CE-merket fjernes fra produktet.

Etterlat aldri et barn i rullestolen uten tilsyn av en voksen.

Max brukervekt er 60 kg.

Tippesikringen skal alltid benyttes. Dersom tippesikringen fjernes endres veltevinklene til rullestolen, og farlige situasjoner kan oppstå.

Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet mot å falle av rullestolen, og sikrer også en korrekt sittestilling.

Største vinkel på underlaget (Maximum Safe Slope) er 14°. Større vinkel på underlaget vil føre til at rullestolen velter.

Krabat Jockey er ikke et leketøy. La derfor ikke barn leke med produktet, da dette kan føre til skade både på barnet og produktet.

Benytt rullestolen kun slik som fysio- eller ergoterapeuten har foreskrevet.

Krabat Jockey er ikke godkjent for bruk i bil.

Overflatetemperaturen på rullestolen kan bli høy dersom den er eksponert for sterkt sollys og/eller varme over lengre tid. Kontroller temperaturen før barnet settes i rullestolen under slike forhold.

Da rullestolen har bevegelige deler kan klemfare forekomme.



Jockey & Jockey Plus

01.0	Generelt	s. 05
02.0	Hoveddeler	s. 06
03.0	Bruk	s. 10
04.0	Tilbehør	s. 14
05.0	Vedlikehold	s. 15
06.0	Justeringer/tilpasninger	s. 15
07.0	Notater	s. 16





01

Generelt

Denne bruksanvisningen dekker bruk av Krabat Jockey med manuelt og elektrisk seteløft. Krabat Jockey kommer i to forskjellige størrelser, og mange forskjellige konfigurasjoner er mulig med forskjellig tilbehør.

Krabat Jockey er en aktivitetsstol beregnet for barn i alderen ca 2 til ca 14 år (2 størrelser).

Stolen er høydejusterbar fra helt nede på gulvet til høyere enn en kjøkkenbenk. Sittestillingen kan tilpasses det enkelte barnet gjennom justering av setevinkel, ryggvinkel, posisjon til fotbrettene og de forskjellige vinklene til fotbrettene. Bruk av stolen bør avgjøres av barnets fysio- eller ergoterapeut.

I Krabat Jockey er plassering av føtter utgangspunktet for den gode sittestillingen. Her får barnet en bred understøttelsesflate, noe som skaper god balanse og som sammen med salsetet gir en nøytral og naturlig

stilling i bekkenet. Dette gir ryggsøylen en naturlig kurve og barnet får en klar midtlinje som opprettholder balansen og gir et godt utgangspunkt for aktivitet. Det forhindrer barnet i å synke sammen i overkroppen og hjelper barnet til en aktiv sittestilling. I tillegg blir bryst- og hodekontrollen enklere når kroppen er i naturlig stilling noe som gjør svelging, tale og pust lettere.

For å sikre en optimal sittestilling, er det avgjørende at en utprøving og tilpassing har funnet sted for barnet som skal bruke stolen før den tas i bruk. Ta ikke stolen i bruk dersom individuell utprøving ikke har funnet sted. La heller ikke andre barn benytte stolen med mindre individuell utprøving har funnet sted.

Barn vokser og endrer sittemønster kontinuerlig. Det kan derfor hende at barnet etterhvert vil trenge en annen setestørrelse eller andre justeringer.

Ta kontakt med barnets fysio- eller ergoterapeut dersom du ikke synes at produktet fungerer optimalt eller dersom du tror det er nødvendig med justeringer.



02.0

Hoveddeler -Jockey Manuell

*Fig. 01
Hoveddeler manuell versjon*

Krabat Jockey manuell versjon har følgende hoveddeler:

- 01** Salsete med justerbar setevinkel
- 02** Justerbar rygg
- 03** Justerbare individuelle fotbrett eller justerbar fotplate
- 04** Understell
- 05** Låsbare hjul
- 06** Ledsagerhåndtak med integrert betjeningsknapp for hev og senk funksjon
- 07** Sentralsøyle



02.1

Hoveddeler -Jockey Elektrisk

Fig. 02
Hoveddeler elektrisk versjon

Krabat Jockey elektrisk versjon har følgende hoveddeler:

- 01** Salsete med justerbar setevinkel
- 02** Justerbar rygg
- 03** Justerbare individuelle fotbrett eller justerbar fotplate
- 04** Understell
- 05** Låsbare hjul
- 06** Sentralsøyle
- 07** Batteri
- 08** Lader
- 09** Nettkabel



02.2

Hoveddeler -Jockey Plus Manuell

*Fig. 03
Hoveddeler manuell versjon*

Krabat Jockey manuell versjon har følgende hoveddeler:

- 01** Salsete med justerbar setevinkel
- 02** Høy rygg med justerbar høyde og vinkel
- 03** Justerbare individuelle fotbrett eller justerbar fotplate
- 04** Understell
- 05** Låsbare hjul
- 06** Ledsagerhåndtak med integrert betjeningsknapp for hev og senk funksjon
- 07** Sentralsøyle
- 08** Justerbare sidestøtter
- 09** Justerbar hodestøtte (ekstrautstyr)
- 10** Vest (ekstrautstyr)
- 11** 4mm Unbrakonøkkel for justering av hodestøtte plassert under setet



02.3

Hoveddeler -Jockey Plus Elektrisk

Fig. 04
Hoveddeler elektrisk versjon

Krabat Jockey Plus elektrisk versjon har følgende hoveddeler:

- 01 Salsete med justerbar setevinkel
- 02 Høy rygg med justerbar høyde og vinkel
- 03 Justerbare individuelle fotbrett eller justerbar fotplate
- 04 Understell
- 05 Låsbare hjul
- 06 Ledsagerhåndtak med integrert betjeningsknapp for hev og senk funksjon
- 07 Sentralsøyle
- 08 Justerbare sidestøtter
- 09 Justerbar hodestøtte (ekstraustyr)
- 10 Vest (ekstraustyr)
- 11 4mm Unbrakonøkkel for justering av hodestøtte plassert under setet
- 12 Batteri
- 13 Lader
- 14 Nettkabel



03.0

Bruk

Før Krabat Jockey tas i bruk, må sete-, rygg- og fotbrettvinkler innstilles for å gi barnet optimal sittestilling. Justeringene bør foretas av fysio- eller ergoterapeut som har mottatt opplæring fra Krabat AS eller av representant for Krabat AS.

Alle vinkler kan stilles inn trinnløst. Individuelle fotbrett justeres med låsehendelene som vist i fig. 5. Felles fotplate kan justeres med to låsehendler som vist i fig. 6. Setevinkel justeres med skruhylsen vist i fig. 7. Ryggvinkel fikses med låsehendel på baksiden av ryggen som vist i fig. 8.

Hvordan barnet skal bruke stolen bør drøftes med ergo-/fysioterapeut eller en som kjenner barnet godt. En bør avklare i hvilke situasjoner en ønsker å ta i bruk stolen, hvor lenge den skal brukes av gangen og om en bør øke bruken gradvis. Dette bør også evalueres underveis etter hvert som barnet blir vant til stolen.



03.1

Individuelle fotbrett

Føttene plasseres på fotbrettene og remmene over føttene tilpasses og strammes. Barn som bruker ankelortoser bør benytte disse og evt sko i Krabat jockey. Høyden på fotbrettene kan justeres ved å flytte fotbrettene i sporene, men også ved å justere lengden på remmen fra undersiden av setet og ned til braketten som holder fotbrettene. Fotbrettene kan være utstyrt med ankel-mansjetter (tilbehør). Disse må i så fall tilpasses slik at barnets fot er i ønsket stilling på fotbrettene.

Fig. 05

Justering av individuelle fotbrett



03.2

Felles fotplate

Høyden på fotplaten kan justeres ved å flytte fotplaten i sporene, men også ved å justere lengden på remmen fra undersiden av setet og ned til braketten som holder fotplaten. Fotplaten kan være utstyrt med ankelmansjetter (tilbehør). Disse må i så fall tilpasses slik at barnets fot er i ønsket stilling på fotplaten.

Fig. 06

Justering av felles fotplate



03.3

Setevinkel

Barnet plasseres på salsetet og hoftebeltet justeres og festes. Påse at barnet kommer helt bak på salsetet og sitter rett og symmetrisk med underkroppen. Hoftebeltet må alltid benyttes, siden det også er barnets sikkerhet mot å falle av stolen. Vinkelen justeres ved å skru på hylsteret under setet. Setevinkelen er selvlåsende, og trenger ikke å fikseses.

Fig. 05*Justering av setevinkel*

03.4

Ryggvinkel og ryggghøyde

Ryggvinkelen justeres og fikseses med låsehendelen plassert bakpå ryggplaten. Dersom låsehendelen ikke strammer skikkelig, kan forspenningen justeres med plastringen under selve hendelen. Ryggghøyden kan justeres ved å løsne låsehendelen, og så bevege ryggen opp eller ned i til sammen 5 posisjoner med intervaller på 1cm. Det er viktig å stramme låsehendelen når ryggen har riktig høyde.

Fig. 06*Justering av ryggvinkel og ryggghøyde*

03.5

Justering av sidestøtter -Jockey Plus

Sidestøttene justeres opp og ned ved å løsne skruene som vist på figur 09. Det er tilstrekkelig å løsne skruene, de trenger ikke å demonteres. Dra til skruene etter justering.

Sidestøttene justeres ut og inn på samme måte

Fig. 07*Justering av sistestøtter*



03.8

Justering av setehøyde -Elektrisk

Setehøyden reguleres ved hjelp av fjernkontrollen. Fjernkontrollen er vist i figur 16, og har en knapp for å bevege setet opp og en for å bevege setet ned. Når man slipper knappen, stopper bevegelsen. Når setet er helt i øverste eller nederste posisjon, kommer det en pipelyd for å gi beskjed om at setet er i ekstrem-stilling.

Dersom det kommer en pipelyd mens stolen bevegtes opp eller ned, betyr dette at batteriet trenger lading.

Fig. 16
Elektrisk justering av setehøyde



03.9

Bruk av batteri og lading av batteri -Elektrisk

Batteriet plasseres i batteriholderen under stolen som vist i fig. 02. Batteriet har innebygde magneter, og vil selv orientere seg i riktig posisjon. Når et fulladet batteri settes inn i holderen, og det er orientert i riktig posisjon, høres et BEEEEEP. Dette indikerer at konnekteringen er i orden, at spenningsnivået er akseptert og at systemet kan brukes.

Dersom det høres en BEEP..BEEP lyd når stolen ikke er i bruk, indikerer dette at batteriet må lades. Dersom den samme lyden høres når stolen er i bruk, betyr det det samme.

Når batteriet skal lades, tas det ut av batteriholderen. Batteriladeren kobles til nettspenning med nettkabelen. En gul diode lyser på batteriladeren for å indikere at den er tilkoblet strømmettet. Batteriet plasseres i batteriladeren, se fig. 17. En grønn diode begynner å blinke for å indikere at batteriet lades. Når batteriet er fulladet, lyser den grønne dioden kontinuerlig. Lading av et tomt batteri tar 5-8 timer. Batteriet er av en type (NiMH) som tåler lading selv om det ikke er helt tomt.

Fig. 17
Lading av batteri



04.0

Tilbehør

Alt tilleggsutstyr har egen bruksanvisning som følger utstyret. Det finnes et stort utvalg av tilbehør til krobat Jockey slik som bord, forskjellige vester, ankelmansjetter, bag osv. Se www.krobat.no for oppdatert liste over tilbehør. Bruksanvisning til det forskjellige tilbehøret følger hvert enkelt tilbehør.

04.1

Tekniske data

	STR. 1.	STR. 2
Setedybde(maks)	26 cm	31 cm
Ryggvinkel	-10° til -40°	-20° til -40°
Setevinkel	-20° til +20°	-20° til +20°
Avstand fra sete til fotbrett	15 til 40 cm	25 til 50 cm
Setehøyde	39 til 79 cm	40 til 80 cm
Total lengde i bruk/sammenslått	68 cm / 65 cm	98 cm / 83 cm
Total høyde i bruk/sammenslått	112 cm / 63 cm	121 cm / 72 cm
Total bredde i bruk/sammenslått	63 cm / 63 cm	66 cm / 66 cm
Ryggbredde	25 cm	32 cm
Rygghøyde	35 eller 38 cm	40 eller 43 cm
Vekt manuell/elektrisk	12.2 kg / 13.9 kg	15.0 kg / 16.7 kg
Alder	Ca 2-7 år	Ca 7-14 år
Maks brukervekt manuell/elektrisk	65 kg / 50 kg	65 kg / 50 kg



05.0

Vedlikehold

Alle metall- og plastdeler kan vaskes med mildt såpevann. Sete- og ryggtrekket er i møbelstoff, og kan vaskes med klut og såpevann. Trekkene kan også vaskes i maskin på 40 °C. Trekkene er festet til produktet med borrelås. Flekkfjerningsguide for tekstilene finnes på www.krabat.no. Kulelagre og andre bevegelige deler er vedlikeholdsfrie, og skal ikke smøres.

06.0

Individuelle justeringer og tilpasninger

Dersom barnet vokser, endrer sittemønster eller av andre grunner har behov for justering eller individuell tilpassing av stolen, ta kontakt med fysio- eller ergoterapeut. Endringer eller tilpassinger må utføres av kvalifisert personell eller Krabat AS.

Gjør under ingen omstendigheter modifikasjoner på produktet på egenhånd.

07.0

Notater

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



Notater

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.



krabat[™]

KRABAT AS

Ravnsborgveien 56, 1395 Hvalstad

Telefon: 66 77 73 00

Fax: 66 77 73 01

www.krabat.no

© Krabat, januar 2016

